

Navodila za uporabo

**PUMPICA ZA PENIS
BONERS 2**

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



POMOČ PRI TEŽAVAH Z EREKCIJO

- Najprej s cilindrom zaobjameš penis. Penis mora biti v pol-pokončnem položaju.
- Poskrbiš za dober stik pumpice s kožo.
- Nato začneš črpati zrak in nekaj časa, recimo 3-5 min, držiš penis pod pritiskom v cilindru (maksimalno 10, ne pa več). S tem povečaš pritok krvi vanj.
- Nato cilinder odstraniš, okoli korena penisa pa namestiš obroček za penis, s katerim poskrbiš, da se kri zadrži v penisu, da ne odteče.
- Ta tehnika ti pomaga, da imaš čvrst penis nekaj časa, nekje 15-20 minut, potem priporočamo, da obroček odstraniš.

POVEČANJE PENISA

- Pumpico namestiš na penis, začneš s črpanjem in ko dosežeš maksimalni pritisk, torej, ko ne boli, držiš penis v tem stanju 3-5 minut. Nato sprostiš in ponoviš približno trikrat.
- Če želiš dolgoročno spremembo, ti svetujemo redno uporabo 15 minut dnevno 3-krat tedensko in najmanj 1-2 meseca, vsaj na začetku. Ko se navadiš, lahko pogostost treninga povečaš. Pri redni uporabi pričakuj razliko 2-3 cm v roku 3 mesecev.

NEKAJ NASVETOV

- Priporočamo, da pred uporabo skrajšaš sramne dlake, saj bo s tem stik s kožo boljši, obenem pa preprečiš kakršno koli cukanje.
- Na rob namaži malo lubrikanta, ki zmanjša drgnjenje oziroma trenje, ne pa preveč, da ti pumpica ne bi drsela.
- S pumpanjem začni počasi in prenehaj takoj, ko začutiš bolečino! Bolečina ni dobra stvar, pomeni, da pretiravaš in da je pritisk premočen. Z uporabo nikar ne pretiravaj, več pritiska ne pomeni boljših rezultatov. Če pretiravaš, obstaja možnost poškodb, kot so modrice ali zmanjšanje občutljivosti penisa. Zato takoj, če začutiš ali občutiš bolečino, sprosti vakuum in pumpico odloži za dan ali dva.

Pomembno opozorilo:

Pumpice za penis ne morejo uporabljati vsi. V primeru določenih zdravstvenih težav, kot so slabokrvnost, bolezni, ki povzročajo nastanek krvnih strdkov ali prekomernih krvavitev, če jemlješ zdravila za redčenje krvi ali zdravila za težave z erekcijo, se o uporabi pumpice posvetuj z zdravnikom.

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

